



AB Medical Group Eesti OU

info@abmedical.ee

[www.abmedical.ee](http://www.abmedical.ee)

## **Kuidas seadistada uut pumpa? MiniMed 780G seadistamise juhend**

PUMBA SEADISTAMINE EELMISE PUMBA JÄRGI või raviarsti juhiste järgi:

1. Booluskalkulaator: peamenüü → insuliin → manustamise sätted → booluskalkulaatori seadistus
2. Basaalinsuliini skeem: peamenüü → insuliin → manustamise sätted → basaal skeemi seadistus
3. sensori sätted: peamenüü → sätted → märguannete sätted → kõrge ja madala VS märguanne; kõrge ja madala kordus
4. saatja ühendamine pumbaga: peamenüü → seotud seadmed → uue seadme sidumine
5. Telefoni ühendamine pumbaga: peamenüü → seotud seadmed → Uue seadme sidumine
6. SmartGuardi sihtväärtus: peamenüü → SmartGuard → SmartGuardi sätted → valida sobiv