



## UUE SAATJA EHK TRANSMITTERI ÜHENDAMISE JUHEND INSULIINIPUMBALE MINIMED 640G

AB Medical Group Eesti OÜ

Enne kui hakkate uut saatjat pumbaga siduma, tuleb vana saatja ühendus pumbast ära kustutada.

1. Samm: vana saatja kustutamine pumbast.  
Peamenüü → Utilities → Device options → Delete,
2. Uue saatja sidumine pumbaga: **laadige saatja eelnevalt ära enne järgmisi juhiseid.**  
Peamenüü → Utilities → Device options → Connect device → Auto Connect → Continue → Eemaldage saatja laadijast → kinnitage leitud seadme seerianumber.


Vt pikemat juhendit antud faili 2. leheküljel. Allikas: „MiniMed 640G lühijuhend EST“, lk 50-51.


## 14. osa: Pumba ja saatja ühildamine


Enne sensori esmakordset kasutamist tuleb teil pump ja saatja omavahel ühildada ja seada üles nendevaheline juhtmevaba andmevahetus, et need saaksid omavahel suhelda. See võimaldab pumbal sensori edastatavat teavet kuvada.

Pumba ja saatja ühildamiseks toimige alljärgnevalt.

1. Ühendage omavahel saatja ja laadija ning veenduge, et saatja oleks täis laetud.

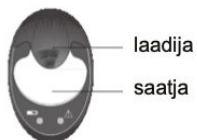

3. Valige **Auto Connect** (automaatne ühildumine), vajutage , seejärel valige **Continue** (jätkka). Käsitsi ühildamise juhised leiате MiniMed 640G kasutusjuhendist

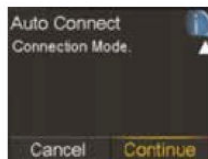


2. Vajutage  ja valige **Utilities > Device Options > Connect Device** (utilliidid > seadme valikud > ühilda seade).

Pumbaga saab ühildada korraga vaid ühe saatja. Uue saatja ühildamisel tuleb teil esmalt valida **Manage Devices** (halda seadmeid), valida vana saatja number ja see mälust kustutada (**Delete**).



4. Enne jätkamist veenduge, et saatja on laadijas. Nüüd käivitage otsimine (Search) mõlema seadme puhul.

- 4a. Eemaldage saatja laadijast. Kui saatja tuluke rohelisena ei vilgu, ühendage see uuesti laadijaga kuni see on täis laetud.

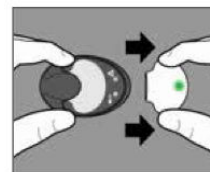

- 4b. Valige koheselt pumbal **Search** (otsi). Otsing võib kesta kuni 2 minutit.



5. Kui seade on leitud, veenduge, et pumba ekraanil kuvatav seerianumber (SN) kattub saatja tagaküljel kirjas oleva seerianumbriga ning vajutage kinnitamiseks **Confirm** (kinnita). Kui ekraanile kuvatakse sõnum **No devices found** (seadeid ei leitud), asetage saatja tagasi laadijasse. Seejärel võtke saatja laadijast ja valige koheselt pumbal **Retry** (proovi uuesti).



6. Seadmed on nüüd ühildatud. Saatja seerianumber kuvatakse pumba ekraanile.

**Märkus:** nii tuleb toimida vaid saatja esmakordsel seadistamisel. Te ei pea seda iga uue sensori paigaldamisel kordama.



**Märkus:** kui lõpetate mingiks ajaks CGM süsteemi kasutamise ja teil on vaja saatjat kuidagi hoiustada, siis hoidke saatjat laadijas kogu hoiustamisaaja vältel. Sellega kindlustate saatja aku parema säilimise.