


## UUE SAATJA EHK TRANSMITTERI ÜHENDAMISE JUHEND INSULIINIPUMBALE MINIMED 780G



Enne kui hakkate uut saatjat pumbaga siduma, tuleb vana saatja ühendus pumbast ära kustutada.

1. Samm: vana saatja kustutamine pumbast.  
Peamenüü → Seotud seadmed → Sensor → Lahuta → OK!
2. Uue saatja sidumine pumbaga: **laadige saatja eelnevalt ära enne järgmisi juhiseid.**  
Peamenüü → Seotud seadmed → Uue seadme sidumine → Võtke saatja laadijast lahti (pilt 1). → Kinnitage pumbas leitud seade. Kontrollige leitud saatja seerianumbrit (SN). Sidumise õnnestumise korral ilmub tekst „Sidumine õnnestus!“

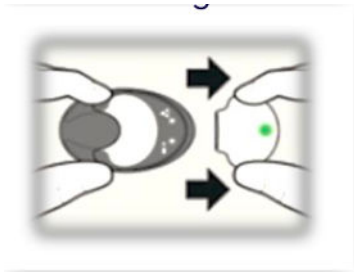

Pilt 1.

AB Medical Group Eesti OÜ