

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ НОВОГО ПЕРЕДАТЧИКА К ИНСУЛИНОВОЙ ПОМПЕ МИНИМЕД 780G

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ НОВОГО ПЕРЕДАТЧИКА К ИНСУЛИНОВОЙ ПОМПЕ МИНИМЕД 780G


Перед подключением нового трансмиттера к помпе необходимо подключить старый трансмиттер к помпе.

Шаг 1: Удаление старого передатчика из помпы.

Главное меню-> Связанные устройства -> Датчик -> Отключить-> ОК!

2. Подключение нового передатчика к насосу: предварительно разгрузите передатчик, прежде чем следовать приведенным ниже инструкциям.

Главное меню -> Связанные устройства -> Сопряжение нового устройства -> Выньте передатчик из зарядного устройства.

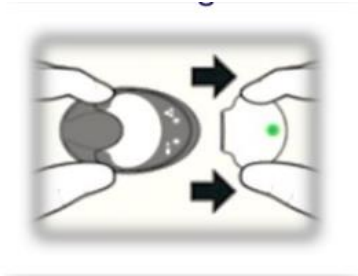

(рисунок 1) -> Подключите устройство, найденное в насосе. Проверьте серийный номер найденного передатчика.

(SN). Если сопряжение прошло успешно, появится сообщение «Связка удалась»!