

Medtronic MiniMed  
Northridge, CA 91325, USA  
(800) 646-4633  
(818) 576-5555  
www.medtronicdiabetes.com

Medtronic B.V.  
6422 PJ Heerlen  
The Netherlands  
31 (0) 45 566 8000


D6024420-CV11 111908



Medtronic

## Reservuaar MMT-326A, MMT-332A

Vaadake pumba ja infusioonikomplekti kasutusjuhendit ettevalmistamiseks ja paigalduseks.

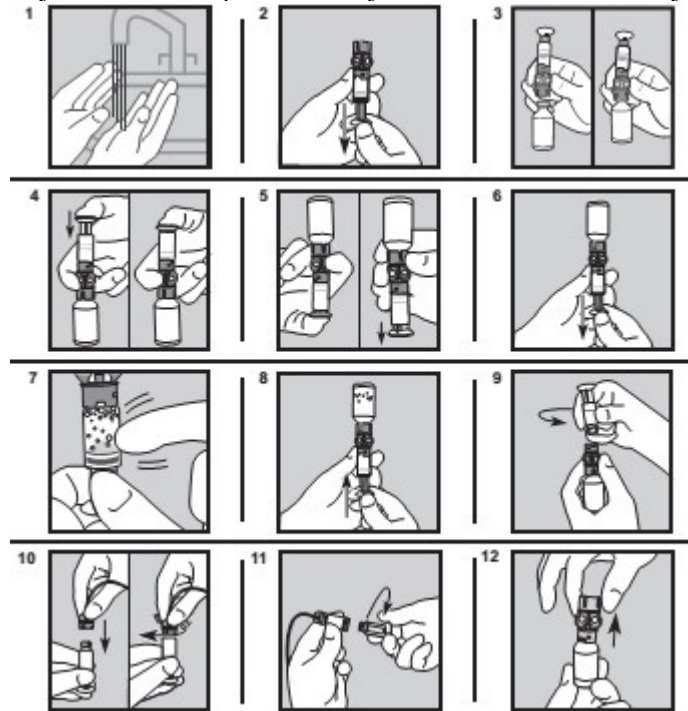

### Näidustused

Reservuaar on mõeldud nahaaluseks ravimi (sh insuliin) infusiooniks Medtronic Minimed pumba ja infusioonikomplekti abil.

### Kõrvaltoimed

Reservuaariga on vastunäidustatud vere või veretoodete infusioon.

### Hoiatused

Reservuaar ja nõel on steriilne, mittepürogeene ja ainult ühekordseks kasutamiseks. Mitte puhastada või resteriliseerida. Mitte kasutada kui pakend on avatud või vigastatud.

Visake nõel ära kasutades teravate esemete jaoks mõeldud konteinerit.

Õhumullide kõrvaldamata jätmine reservuaarist võib põhjustada ebatäpset ravimi (sh insuliini) manustamist.

### Ettevaatusabinõud

Insuliin peab olema enne reservuaari täitmist toatemperatuuril. Kasuta koheselt kui reservuaar on täidetud ravimiga. Mitte säilitada.

Kontrolli lekete puudumist peale reservuaari ja infusioonikomplekti vahetamist.

Oma esmane seadistamine vii läbi tervishoiutöötaja juuresolekul.

### Garantii

Külasta lehekülge <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.



Kasutada enne (aasta-kuu)



Ava siit



Mitte taaskasutada



Partii number



Tähelepanu! Vaata kasutusjuhendit



Steriliseerimise meetod: ethylene oxide

REF

Katalooginumber



Vaheta iga kolme päeva tagant



Mittepürogeenne



Lateksivaba

### **Maaletooja**

AB Medical Group Eesti OÜ

Reti tee 12, Peetri alevik

75312 Rae vald,

Harjumaa

[www.abmedical.ee](http://www.abmedical.ee)