

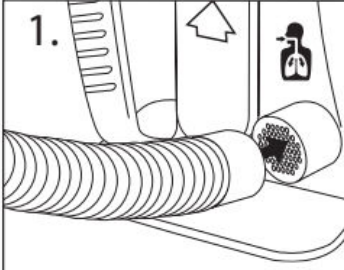
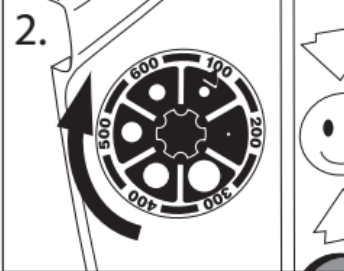
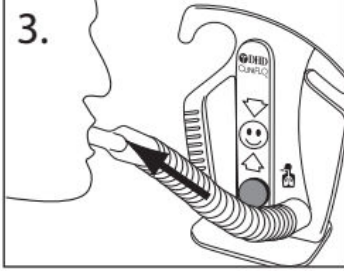
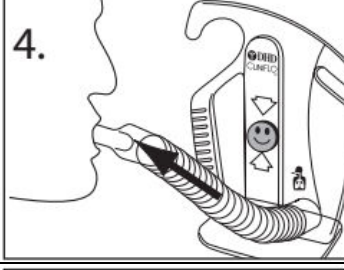

DHD CliniFLO®

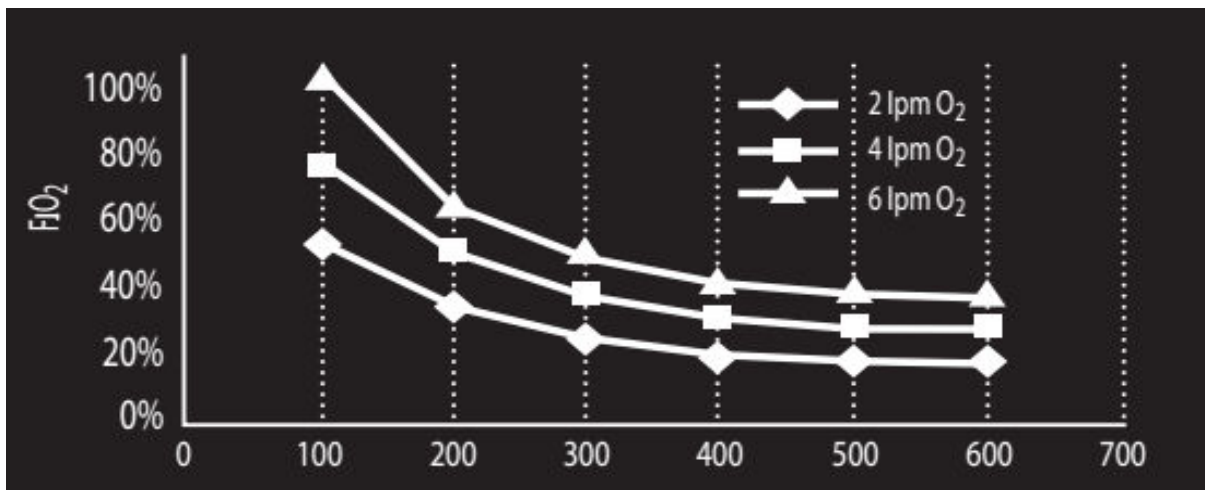
Näidustus: DHD CliniFLO® on ette nähtud ergutamaks/tõhutamaks sügavat sissehingamist operatsioonide järgselt ja atelektaaside ravis.

Vastunäidustused:

1. Patsient ei ole võimeline kasutama seadet pärast korralikku instrueerimist
2. Vitaalkapatsiteet on väiksem kui 10 ml/kg kehakaalust

Kasutusjuhhis:

<p>1) Kinnita voolik koos huulikuga seadmele. Pikenda voolikut.</p>	
<p>2) Seadista ringskaalal seadme tagaküljel soovitud voolu kiirus. Patsient peab olema võimeline sisse hingama vähemalt viis sekundit.</p>	
<p>3) Pane huulik suhu. Hinga sisse aeglaselt ja sügavalt nii et kollane kuul püsiks näopildi kõrgusel noolte vahel.</p>	
<p>4) Hinga nii sügavalt kui võimalik. Kui enam ei suuda sisse hingata siis hoi a hinge kinni 5 sekundit ning seejärel hinga normaalselt välja</p>	
<p>5) Korda harjutust 5-10 korda iga tund või nii nagu on ette kirjutatud.</p>	



Sissehingatav vool ml/sek.



	3s	4s	5s	6s	7s	8s
100 ml/s	300ml	400ml	500ml	600ml	700ml	800ml
200 ml/s	600ml	800ml	1000ml	1200ml	1400ml	1600ml
300 ml/s	900ml	1200ml	1500ml	1800ml	2100ml	2400ml
400 ml/s	1200ml	1600ml	2000ml	2400ml	2800ml	3200ml
500 ml/s	1500ml	2000ml	2500ml	3000ml	3500ml	4000ml
600 ml/s	1800ml	2400ml	3000ml	3600ml	4200ml	4800ml



Tähelepanu: loe kasutusjuhendit. Lateksi vaba. Ära kasuta seadet kui pakend on purunenud. Mittesteriilne seade. Kataloogi number. Partii kood. Tootmise kuupäev. Kvaliteet. **Hoiatus:** USA seadus lubab seadet müüa arsti ettekirjutusel. Mõeldud kasutuseks korraga ühele patsiendile.



 **Smiths Medical ASD, Inc.**
Rockland, MA 02370, USA

EC REP Smiths Medical International Ltd.
Hythe, Kent, CT21 6JL, UK

Australian Representative:
Smiths Medical Australasia Pty. Ltd
Brisbane, QLD 4113, Australia

 **0473** smiths medical

Seadmete maaletooja

AB Medical Group Eesti OÜ

Reti tee 12

Peetri alevik

75312 Rae vald, Harjumaa

tel:6552310

e-mail: info@abmedical.ee

