

Tootekirjeldus ja sihtotstarve

Securin Adhesive Remover Wipe (SAR Wipe) on nahasõbralik puhastussalvrätt, mis ei sisalda alkoholi ega lõhnaaineid. SAR Wipe'i sihtotstarve on järgmine:

- valmistada nahka ette kleeptoodete paigaldamiseks, eemaldades nahalt liigse rasu;
- hõlbustada nahalt kleeptoodete eemaldamist.

SAR Wipe sobib kasutamiseks nii väljaõppinud tervishoiutöötajatele kui ka tavainimestele.

Näidustused

- SAR Wipe'i eesmärk on valmistada nahka ette kleeptoodete paigaldamiseks.
- SAR Wipe'iga hõlbustatakse nahalt kleeptoodete ja liimainejääkide eemaldamist.

Vastunäidustused

- SAR Wipe'i ei tohi kasutada isikutel, kes on toote koostisosade suhtes teadaolevalt allergilised.
- SAR Wipe'i ei tohi kasutada lahtistel haavadel.

Hoiatused

SAR Wipe'i tohib imikutel kasutada vaid meditsiinilise järelevalve all. SAR Wipe on ette nähtud kasutamiseks vigastamata nahal. Vältige toote kasutamist õrnal, tundlikul või vigastatud nahal või limaskestal (nt haavapõhjal, silmal, kõrval, ninal, suul, suguelundil, anusel või stoomil), kuna see võib ärritada nahka. Kui SAR Wipe'i kasutamisel esineb püsivat nahaärritust, pidage nõu tervishoiutöötajaga. Hoida eemal soojusallikast, sädemetest, leekidest ja kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. Ümbertöötlemine, pesemine, desinfitseerimine ja/või (uuesti) steriliseerimine võib kahjustada toote omadusi ja suurendada kasutaja kehavigastuse või nakkuse ohtu. Furine ApS ei võta endale vastutust mistahes kahjustuste ega kahjude eest, mis võivad kaasneda Furine ApS-i hetkel kehtivate soovitude eiramisega.

Lisateave

Tootega seotud raske kehavigastuse (õnnetusjuhtumi) korral võtke ühendust meie kohaliku turustaja või tootjaga ja kohaliku pädeva asutusega. Kui vajate lisateavet või tehnilist abi, võtke meiega ühendust veebilehel www.furine.com.

Koostisosad: siloksaan

Kasutusjuhend

Naha ettevalmistamine enne kleeptoodete paigaldamist.

Rebige kott lahti, eemaldage salvrätt ja voltige see laiali.

Hõõruge salvrätiga õrnalt nahapiirkonda, kuhu kavatsete paigaldada kleeptoote.

Veenduge, et varem kasutatud nahahooldustoodete jäägid eemaldatakse täielikult.

Kleeptoodete eemaldamine.

Alustage kleeptoote servast, hõõrudes seda õrnalt SAR Wipe'iga. Jätkake SAR Wipe'iga hõõrumist, liikudes järkjärgult kleeptoote alla, et see naha küljest täielikult eemaldada.

Kui salvrätt muutub kleeptoote eemaldamise käigus kuivaks, visake see ära ja võtke uus.

Ärge kasutage kuivanud salvrätte.

Kui olete kleeptoote naha küljest eemaldanud, kasutage liimainejääkide eemaldamiseks uut SAR Wipe'i.

Kõrvaldamine. Kõrvaldage toode vastavalt kohalikele eeskirjadele (nt koos kodumajapidamisjäätmatega).



CE-märgisega seade



Ühekordselt kasutatav



Steriliseerimata



Juriidiline tootja:
Furine ApS
Industrivaenget 1
3320 Skaevinge
Taani



Lugege kasutusjuhendit



Kõlblik kuni
Märgitud põhipakendile

Versioon: IFUxA001-02EE
2025-01



30°C
5°C Säilitustingimused



Partiitähis
Märgitud põhipakendile



Viitekode
A001



Meditsiiniseade



Lateksivaba



Ringlussevõetav
pakend



Eriti tuleohtlik