


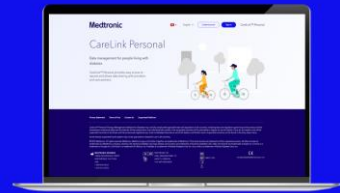

CareLinki tarkvara hooldus

11. SEPTEMBRIL 2025 kell 18.00–18.45 (KESK-EUROOPA SUVEAJA JÄRGI)

Medtronic



Lugupeetud Medtronicu kogukonna liige!

Tulekul on CareLink™ Personali plaaniline tarkvaravärskendus, mille ajal katkeb tarkvara võrguühendus:



11. september 2025
kell 18.00–18.45 (Kesk-Euroopa suveaja järgi)

Mis muutub?

Teeme mõne värskenduse, et parandada teie CareLink™ Personali kasutajakogemust.

- Kui CareLink™ Personali pole 72 tunni jooksul andmeid üles laaditud, siis saavad MiniMed™ Mobile'i rakenduse kasutajad rakendusesiseseid tõuketeavitusi.
- Lisame CareLink™ Personali veebilehele heebrea ja araabia keele.
- Väiksemad CareLink™-i aruandeid puudutavad värskendused.

Te pole kindel, kas tõuketeavitused on sisselülitatud? Vaadake üle MiniMed Mobile'i rakenduse sätteid.

Eeldatav toimimine korralise hoolduse ajal

Selle värskenduse toimumise ajal saate jätkata ettevõtte Medtronic seadmete ja seotud mobiilirakenduste kasutamist. Kuni CareLink™ Personal on võrguühenduseta, seni:

- ei ole CareLink Personali veebileht carelink.minimed.eu kättesaadav;

- ei ole andmed ja teavitused hoolduspartneritele kättesaadavad;
- andmeid ei sünkroonita lingitud kliinikutega;
- mobiilirakendustes võidakse kuvada hüpikaknaid teadetega „Server connection error“ (Serveri ühenduse tõrge) ja „Upload Failed“ (Üleslaadimine ebaõnnestus);
- kui kasutate InPen™-i rakendust koos ettevõtte Medtronic toodetud glükoositaseme pidevat jälgimist võimaldava lingitud sensoriga, siis ei näe te InPen™-i rakenduses oma sensori glükoositaset;
- niipea, kui CareLink™ Personal on jälle võrguga ühendatud, taastuvad andmevoog ja teatiste edastamine automaatselt;

kui värskendus on lõpule jõudnud, kontrollige oma mobiilirakendus(t)e ühendust CareLink™ Personaliga. Kui ühendus puudub, peate oma mobiilirakendus(t)e kaudu uuesti CareLink™ Personali sisse logima.

Juhised mobiilirakenduse kaudu CareLink™ Personali sisselogimiseks:

MiniMed™-i
mobiilirakendus



CareLink™-i
ühendusrakendus



Guardian™-i rakendus



1. Puudutage avakuva vasakus ülanurgas menüüikooni (kolm kriipsu).
2. Puudutage nuppu „Sync to CareLink“ (CareLinkiga sünkroonimine).
3. Puudutage nuppu „Change CareLink Sign-in“ (CareLinki sisselogimise muutmine) ning sisestage oma kasutajanimi ja parool.

Simplera™
rakendus



1. Puudutage avakuval sätete menüüd (hammasrattaga ikoon).
2. Valige menüü suvand „CareLink“.
3. Logige sisse CareLink™ Personali kontole.

**InPen™-i
diabeediravirakend
us**



1. Puudutage valikut „Connections“ (Ühendused).
2. Valige „Medtronic“.
3. Valige „Connect Now“ (Ühenda kohe).
4. Lugege nõusolekud läbi ja valige „Continue“ (Jätka).
5. Logige sisse CareLink™ Personali.

Kui olete kasutajanime või parooli unustanud, siis järgige kuvatud viipasid, et sisselogimisandmed lähtestada.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast ja täname teid kannatlikkuse eest CareLink™-i värskendamise ajal.

Alati teiega
ettevõtte Medtronic diabeedimeeskond

EMEA-DBA-2500372. © 2025 Medtronic. Kõik õigused kaitstud.

This email was sent by: Medtronic Trading International SARL Route du
Molliau 31 Tolochenaz, VD 1131.

[Privacy Statement](#)