

CareSens™ Air

Pideva glükoosimonitooringu süsteem

ET

PCGAB-000057 REV2 2025-07

Ohutusteave

Enne CareSens Air kasutamist tuleb käesolevas peatükis loetletud näidustused, vastunäidustused ja hoiatused kindlasti läbi lugeda, neist aru saada ja neid rangelt järgida.

Kasutusnäidustused

CareSens Air pideva glükoosimonitooringu süsteem (CareSens Air CGM süsteem) on näidustatud vere glükoositasemete pidevaks jälgimiseks rakuvälises vedelikus vähemalt 18-aastastel diabeediga isikutel. CareSens Air CGM süsteem on ettenähtud vere glükoosi standardse testimise asendamiseks diabeedi raviotsuste langetamisel, kui ei ole märgitud teisiti. CareSens Air CGM süsteem aitab tuvastada hüperglükeemia ja hüpoglükeemia trende, andes pidevat vere glükoositeavet, et hallata trendi tuvastamise ja malli jälgimise kaudu vere glükoositasemete muutusi ning abistada meditsiinitöötajatega konsulteerimisel diagnoosi määramisel ja ravil.

Vastunäidustused

- Eemaldage sensor enne röntgenit, MRI-, CT-skannimist, raadiosageduslikku ablatatsiooni, kõrgsageduslikku elektrisoojendust või kõrge intensiivsusega fookustatud ultraheliuuringut. Magnetväljad või kuumus võivad seadet kahjustada, mis võib põhjustada ebatäpsaid glükoositasemenäite või hoiatusi.
- Antud toodet pole hinnatud ega heaks kiidetud järgmiste inimeste jaoks:
 - Imikud ja lapsed vanuses kuni 18 eluaastat
 - Rasedad ja rinnaga toitvad naised
 - Dialüüspatsiendid ja kriitiliselt haiged patsiendid

Hoiatused

- Raske hüpotensioon või šokk võivad anda tulemuseks tavapärasest erinevad mõõtmistulemused. Ärge kasutage toodet patsientidel, kellel on rasked sümptomid, näiteks ketoatsidoos või hüperosmolaarne hüperglükeemiline mitteketootiline seisund, mis võivad anda tavatult madalad mõõtmistulemused.
- Sensorit tuleb kasutada vastavalt käesolevas juhendis toodud juhiste ja see tuleb kasutusjuhendis kirjeldatud viisil kehaosa külge kinnitada.
- Enne sensori kinnitamist peske käed põhjalikult seebi ja jooksva veega ning kuivatage. Pühkige piirkonda, kuhu sensor nahale kinnitatakse, alkoholiga niistutad vatiga ja laske täielikult kuivada. Selle nõude eiramine võib tuua kaasa infektsiooni.
- Ärge kasutage toodet, kui sensori pakend on kahjustatud või avatud. See võib tuua kaasa infektsiooni.
- Ärge kasutage kahjustatud või defektset sensorit. See võib tuua kaasa infektsiooni.
- Kinnitage sensor õlavarre tagaküljele. Puuduvad piisavad tõendid, et sensor töötab korrektselt ka teistele kehaosadele kinnitamise korral.
- Õhukaudse saastumise vältimiseks tuleb sensor kinnitada kohe pärast aplikaatori pakendi avamist.
- Ärge eemaldage aplikaatori korki enne, kui olete sensori kinnitamiseks valmis. Selle nõude eiramine võib tuua kaasa bakteritega kokkupuutest põhjustatud infektsiooni.
- Pärast kaitsekorgi aplikaatorilt eemaldamist ärge suunake seda ühegi inimese poole.
- Ärge vajutage aplikaatori vabastusnuppu enne kui olete valmis sensori kinnitamiseks.
- Kui te kasutate insuliinipumpa, kinnitage sensor vähemalt 8 cm sellest eemale.
- Kui sensori tajuv osa sensori kinnitamise ajal puruneb või lahti tuleb, tuleb kontrollida, kas sensori tajuv osa naha alla ei jäänud. Kui teil pole võimalik tajuvat osa palja silmaga näha, pöörduge abi saamiseks arsti poole. Kui teil on sensori kinnituskohas infektsioonist põhjustatud põletik, punetus, paistetus või valu, pöörduge abi saamiseks meditsiinitöötajate poole.
- Kui teil on sensori kinnituskohas marrastus või tõsine verejooks, lõpetage sensori kasutamine, eemaldage sensor ja pidage kohe nõu arsti või meditsiinitöötajaga.
- Sensori kinnitamisel verejooksu tekkimisel, sensori vale kinnitamise või ebatavaliste mõõtetulemuste korral eemaldage sensor ja kinnitage uus sensor mõnele muule kohale.
- Vallige uue sensori kinnitamiseks uus koht. Uue sensori kinnitamine varasemalt kasutatud kohta võib põhjustada nahaärritust või armistumist.
- Sisestamiseks valitud koht peab vastama järgmistele tingimustele:
 - See peab asuma vähemalt 8 cm eemal insuliinipumba infusiooniseadmest või infusiooni asukohast.

- See ei tohi asuda vöökohta, tätoveeringute, luu, armide või ärritunud naha lähedal.
- See peab olema koht, millele magamise ajal ei minda vastu, mida ei suruta ega vajutata.

- Sensori naha külge kinnitamiseks kasutav teip ja sensori sisestamisel ajal juhisenä kasutatavad nõelad võivad tekitada mõnedel kasutajatel allergilisi reaktsioone (erütem või ödeem) või sügelust. Peaks nii juhtuma, eemaldage kohe teip ja/või sensor ja pidage nõu arsti või meditsiinitöötajaga.
- Hoidke pakendis leiduv desikant väljaspool imikute või laste käeulatus.
- Ärge sööge pakendis sisalduvat desikanti.
- Kui desikanti sisu peaks sattuma teile silma, peske silma kohe põhjalikult jooksva veega. Probleemide tekkimisel pidage nõu arstiga.
- Sensori allaneelamine võib põhjustada lämbumist. Jälgige, et lapsed ei puudutaks sensorit.
- CareSens Air kasutamisel saadud vere glükoosinäidud ei asenda arstiabi ja seda ei saa kasutada diabeedi diagnoosimiseks. Nende näitude eesmärgiks on vaid patsientidele glükoosiandmete andmine, et aidata neil oma diabeediga hakkama saada ning aidata meditsiinitöötajatel anda diagnoose ja määrata ravi.
- Kui leiате, et näidatud vere glükoositase ei vasta korralikult teie sümptomitele, tuleb teil raviotsuste langetamiseks kasutada kohe mõõtmiseks glükomeetrit. Rakendage meditsiinilisi meetmeid või tegutsege vastavalt arsti juhistele.
- Pidage silmas, et sensori töös võib esineda häireid, iseäranis vahetult pärast selle ühendamist.
- Kui teil pole võimalik reaalajas vere glükoositasemeid mõõta (näiteks sensori ülessoojenemisperioodi ajal, süsteemi rikke ajal või kui vere glükoosi trendi nool on kuvatud kujul „...“) või kui praeguse sensori glükoosinäit ei vasta teie sümptomitele või pole ootuspärane, ärge langetage nende alusel raviotsuseid. Selle asemel kasutage raviotsuste langetamiseks glükomeetrit.
- Hooldajad ei peaks langetama raviotsuseid rakendusest Sens365 saadud andmete alusel. Hooldajatega jagatud vere glükoosiandmed võivad olla saadud hiilnemisega ja ei väljenda hetkeolekut ning ei sobi seetõttu raviotsuste langetamiseks või tegutsema asumiseks. Need vere glükoosiandmed sisaldavad ka madala või kõrge vere glükoosi taseme hoiatusi, mis saadetakse edasi hooldajatele. Võimalikke raviotsuseid võib langetada ainult kasutajarakenduses näidatud reaalajas andmete alusel, mitte hooldajarakenduse põhjal.
- Kui teile tundub, et sensori näit ei peegelda korrektselt teie tervislikku seisundit, võite korrekse hinnangu saamiseks kasutada glükomeetrit.
- Ärge kalibreerige, kui teie vere glükoositase muutub kiiresti (2 mg/dL (0,1 mmol/L) või rohkem minutis). See võib avaldada mõju sensori täpsusele.
- Ärge kasutage kalibreerimiseks muudelt kehaosadelt (peopesa, käsivars vms) võetud mõõtmistulemusi kui ainult sõrmeotsast. Tulemus võib olla sõrmeotsast võetust erinev ja see võib mõjutada sensori glükoosinäitude täpsust.
- Kui sõrmest võetu näit on madalam kui 10 mg/dL (0,6 mmol/L) või kõrgem kui 600 mg/dL (33,3 mmol/L), ei saa seda kalibreerimisväärtusena kasutada.
- Kui kalibreerimisväärtus on ebatäpne, ei saa CareSens Air anda täpsaid glükoosinäite. Kui märkate, et sensori näidud ei kajasta pärast kalibreerimist täpselt teie tegelikku tervislikku seisundit, ärge langetage CareSens Air alusel raviotsuseid.
- Sobivate raviotsuste langetamisel abistamiseks reguleerige oma olemasolevad hoiatusseadistused kergemini äratuntavamate peale ja jälgige oma kuvaseadet sageli, et hoiatused märkamata ei jääks.
- Veenduge, et teie nutiseadme helitugevus on valjuks seatud ja pole vaigistatud. Välja lülitatud helitugevuse puhul pole teil võimalik hoiatusi kuulda.
- Kui ühendatud on mõni muu heliseade, näiteks kõrvaklapid, esitatakse hoiatusi ainult läbi ühendatud seadme ja mitte läbi teie nutiseadme kõlari. Kontrollige, et ühendatud seade oleks hoiatuste vastuvõtmise jaoks sobival konfiguratsioonil.
- Kui teie nutiseade või rakenduse teavitused on vaigistatud, ei saa te mitte mingeid heli ega vibratsiooni vormis hoiatusi. Küll aga kuvatakse nutiseadme ekraanile jätkuvalt visuaalseid hoiatusi.
- Lülitage oma nutiseadme operatsioonisüsteemi (OS) automaatsed värskendused välja, et iga kord OS-i käsitsi värskendada. Mõned OS-i funktsioonid võivad mõjutada CareSens Air rakenduse seadistusi ja teie võimalusi hoiatusi vastu võtta. Kontrollige pärast OS-i värskendamist oma seadme seadistusi, et veenduda CareSens Air rakenduse korralikult toimimises.
- CareSens Air rakenduse andmed võivad minna kaotsi, kui neid pilveserverisse üles ei laadita.
- Kui kustutate nutiseadme rakenduse sensori kasutamise ajal, lähevad kõik rakenduse poolt salvestatud andmed kaotsi. Kui teil tekib vajadus rakendus kustutada või erinevale nutiseadmele lülituda, laadige kõik olulised andmed pilveserverisse ja salvestage varufail eraldi salvestusseadmesse.
- Antud tootel on nõõppatarei. Selle allaneelamise korral võib liitium-nõõppatarei põhjustada 2 tunni jooksul raskeid või surmaga lõppevaid vigastusi. Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas. Kui kahtlustate patarei allaneelamist või kehaõrnaruse panemist, pöörduge abi saamiseks kohe arsti poole.

Ohud ja eelised

Ohud

CareSens Air CGM süsteemi kasutamisega seotud ohud:

- Hoiatuste mittesaamine
- Kleepumisreaktsioonid
- Kinni jäänud tajuv osa
- Valed raviotsused

Hoiatuste mittesaamine

Selleks, et CareSens Air CGM süsteemi hoiatustest mitte ilma jääda, peab teie nutiseade järgima i-SENS poolt soovitatud seadistusi. Täpsema teabe saamiseks vt rakenduses **Seaded** > **Opetused**. Lisateabe saamiseks vt kasutusjuhendi jaotisi „Soovitatud nutiseadme spetsifikatsioonid“, „Hoiatuste kasutamine“ ja „Korduma kippuvad küsimused (KKK)“.

Kleepumisreaktsioonid

CareSens Air CGM süsteemis kasutatavad naha kleeplindid või sensoriteibid on läbinud bioloogilise sobivuse testi. Enamikel juhtudel kleepumisreaktsioonid puuduvad või on nõrgad. Osadel kliinilises uuringus osalenutel esines teatud punetust ja paistetust, kuid see ei kujutanud endast suurt meditsiinilist ohtu. Sümptomite püsimisel pidage nõu tervishoiutöötajaga.

Jääkohud

CareSens Air sensori tajuva osa purunemine või lahti tulemine ja naha alla jäämine on ebatõenäoline, kuna kliiniliste katsete ajal seda ei juhtunud. Naha alla jäänud steriiliseeritud tajuvad osad ei kujuta endast tavaliselt olulist meditsiinilist ohtu. Kui tajuv osa puruneb või tuleb lahti ja jääb naha alla ning näitab infektsiooni või põletiku tunnuseid, võtke ühendust oma tervishoiuteenuse pakkuja või lähima ametliku edasimüüjaga.

Valed raviotsused

Kasutajad võivad CareSens Airi kasutades langetada raviotsuseid. Kui aga ravimeetmeid rakendatakse olukordades, kus raviotsuseid poleks tulnud langetada, võivad tulemused olla väga ohtlikud, näiteks insuliini ülemääraste või toptel annuste manustamine kasutaja poolt. Selliste olukordade vältimiseks tutvuge enne mistahes raviotsuste langetamist kasutusjuhendi jaotistega „Ohutusteave“ ja „4 Raviotsused“.

Eelised

CareSens Air CGM süsteemi kasutamisega seotud eelised:

- Hüperglükeemia ja hüpoglükeemia tuvastamiseks kõrge ja madala glükoositaseme hoiatuste saamine.
- Glükoosi trendide ja mallide jälgimine diabeediga paremini hakkama saamiseks
- Sõrmeotsast vereproovi võtmisega seotud probleemide ärajäämine

Trendide ja mallide jälgimine

CareSens Air CGM süsteem aitab tuvastada hüperglükeemiat ja hüpoglükeemiat, andes pidevat vere glükoositeavet, et aidata hallata trendide tuvastamise ja mallide kaudu vere glükoositasemete muutusi, julgustada teid langetama paremaid toitumis- ja treeningharjumustega seotud otsuseid ning abistada meditsiinitöötajatega konsulteerimisel diagnoosi määramisel ja ravil.

Teavitatud olemine

Diabeedi puhul on äärmiselt oluline glükoositasemetega reaalajas tegelemine. CareSens Air CGM süsteem kasutab hoiatusi, et anda teile teada teie liiga kõrgest, liiga madalast või kiiresti muutuvast glükoositasemest. Hoiatuste abil on teil võimalik paremini oma diabeediga hakkama saada.

Sõrmeotsast vereproovi võtmisega seotud probleemide ärajäämine

Võite CareSens Air'i kasutades langetada raviotsuseid. Seade võib asendada glükomeetrite jaoks sõrmeotsast vereproovi võtmise vajadust, vähendades kasutajale valu ja probleemide tekitamist tingimusel, et nende sümptomid ja glükoositasemete pidev jälgimine on järjekindl. Sündmuste kohta lisateabe saamiseks vt kasutusjuhendi jaotist „4 Raviotsused“.

CareSens Air tutvustus

⚠ Hoiatus

CareSens Air CGM süsteemist saadud glükoosinäidud ei asenda professionaalset meditsiiniabi. Nende otstarbeks on vaid patsiendile glükoositaseme muutuste kohta teabe jagamine, et aidata meditsiinitöötajaga nõu pidades paremini diagnoosi panna või ravi määrata.

Kasutamise olulisus

Tavapärased glükomeetrid mõõdavad vere glükoositasemeid ettenähtud aegadel ja ei näita, kuidas tase muutub ega anna ülevaadet glükoositaseme muutustest aja jooksul. CareSens Air CGM süsteem aitab aga diabeediga hakkama saada, mõõtes pidevalt glükoositasemeid rakuvälistes vedelikes ja jagades kasutajaga andmeid glükoositaseme muutuste trendide kohta. Pidev glükoosi mõõtmine arvestab rakuvälises vedelikus glükoosi kontsentratsiooni mõõtes glükoosi kontsentratsiooni veres. Kui glükoosi kontsentratsioon veres aga muutub, muutub glükoos kontsentratsioon rakuvälises vedelikus umbes 5 kuni 15 minutit hiljem.

Toote komponendid


CareSens Air sensor on ettenähtud vaid ühekordseks kasutamiseks. Pärast selle kinnitamist pole sensorit võimalik enam uuesti kasutada. Pakend sisaldab endas järgnevat. Veenduge enne pakendi avamist, et see sisaldab kõiki ettenähtud komponente.

⚠ Hoiatus

- Ärge kasutage toodet, kui sensori pakend on kahjustatud või avatud. See võib tuua kaasa infektsiooni.
- Hoidke pakendis leiduv desikant väljaspool imikute või laste käeulatus.

⚠ Hoiatus

- Ärge sööge pakendis sisalduvat desikanti.
- Kui desikanti sisu peaks sattuma teile silma, peske silma kohe põhjalikult jooksva veega. Probleemide tekkimisel pidage nõu arstiga.

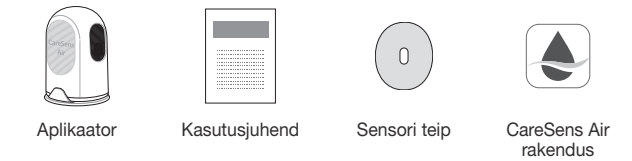

🔍 Märkus

- Sensor asub aplikaatori sees.
- Kaasasolev sensori teip võib olenevalt tootmisajast või -tingimustest erineda.

Aplikaator

Aplikaatorit kasutatakse sensori kaitsmiseks ja sensori nahale kinnitamiseks.

🔍 Märkus

- Aplikaator on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks ja seda pole võimalik uuesti kasutada.
- Ärge vajutage vabastamisnuppu enne kui olete aplikaatorilt ohutuskorgi eemaldanud ja olete valmis sensorit kinnitama.



Aplikaatori osade puhul kasutatakse järgmisi nimetusi:


Nimetus	Funktsioon
Ohutuskork	Hoiab ära sensori kogemata vabastamise.
Vabastusnupp	Nupu vajutamisel sensor vabaneb ja kinnitub kasutaja kehale.

Sensor

Sensor mõõdab glükoositasemeid ja saadab näidud nutiseadmesse.

🔍 Märkus

- Sensor on veekindel. Toode on katsetuste tulemuste kohaselt veekindel 1 meetri sügavuses 24 tunni vältel.
- Jälgige, et tahked osakesed, mis on väiksemad kui 1,0 mm, ei satuks sensori sisse.
- Nutiseade ja sensor tuleb hoida üksteisest kuni 6 meetri kaugusel. Kui nutiseadme ja sensori vahel on vedelik või takistus, võib edastuskaugus olla väiksem.
- Sensor toimib 15 päeva pärast kinnitamist. Enne aegumiskuupäeva saabumist antakse vastav hoiatus.
- Eemaldage sensor enne aegumispäeva saabumist või hiljemalt aegumispäeval.

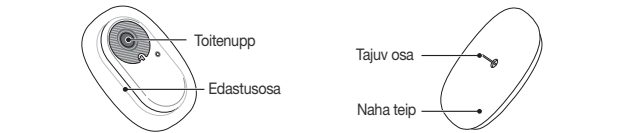

Järgnevas tabelis on märgitud ära anduri erinevate osade nimetused ja funktsioonid.

Nimetus	Funktsioon
Toitenupp	Lülitab sensori toite sisse.
Edastusosa	Sisaldab sisseehitatud toiteallikat ja edastab tajuva osa abil mõõdetud glükoosi kontsentratsiooni väärtust kasutajarakendusse.
Naha teip	Kinnitab sensori kasutaja nahale.
Tajuv osa	Mõõdab kasutaja glükoositaset.

CareSens Air rakendus

Kasutajad saavad jälgida sensoriga mõõdetud vere glükoosinäite nutiseadmesse installitud rakenduses CareSens Air. Rakenduses näidatavad glükoositrendi nooled, glükoositrendid, sündmused ja kalibreerimisväärtused võimaldavad teil tulemusliikumalt vere glükoosi hallata.

Rakendusse CareSens Air salvestatud andmete pilveserverisse üleslaadimiseks tuleb teil registreeruda ja sisse logida. Kui olete CareSens Air kasutamiseks rakendusse sisse loginud, saate alati varundusandmeid laadida isegi juhul, kui olete oma nutiseadme ära kaotanud.

Sümbolite definitsioonid

Järgnevas tabelis on toodud ära IEC (International Electrotechnical Commission / rahvusvaheline elektrotehnika komisjon) kehtestatud meditsiinivaldkonnas kasutatavate elektriseadmete graafilised sümbolid. Need sümbolid ei anna mitte ainult täiendavat teavet toote ja toote kasutamise, vaid ka ohutuse kohta.

Sümbol	Kirjeldus
CE	CE-märkis
EU REP	Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses / Euroopa Liidus
MD	Meditsiiniseade
⚠	Ettevaatust
⊗	Mitte korduvkasutada
📖	Tutvuge enne kasutamist kasutusjuhendi või elektroonilise juhendiga
📄	Tutvuge juhendi/brošüüri
🚰	Tüüp BF kohaldatud osa
☀	Kaitsta päikesevalguse eest
☂	Hoida kuivana
🗑	WEEE (elektri- ja elektroonikaseadmete romud)
🌡	Temperatuuri piir
🔄	Õhuniiskuse piir
🌬	Õhurõhu piir
⊗	Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud ja tutvuge kasutusjuhendiga
IP	Kaitsemäär kõrvaliste ainete või vee sissetungimise vastu
STERILE	Steriliseeritud etüleenoksiidiga
🛡	Üksik steriilne tõkkesüsteem ja väline kaitsev pakend
🏭	Tootja
🌐	Maaletooja
LOT	Partii kood
SN	Seerianumber
🕒	Parim-enne kuupäev

i-SENS, Inc.
43, Banpo-daero 28-gil
Seocho-gu, Seoul 06646
Republic of Korea
CareSensAir.com

EU REP Medical Technology Promed Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert, Germany

CE 0123 MD

© 2025 i-SENS, Inc. Kõik õigused kaitstud.

Kasutamine

1. Rakenduse installimine ja konto registreerimine

Otsige rakendusepoodidest või rakendust CareSens Air, installige see ja viige lõpule registreerumine.

Märkus

Rakenduse CareSens Air allalaadimine

Rakenduse CareSens Air allalaadimiseks tippige link oma brauserisse või skannige QR-koodi.

https://www.caresensair.com/content/download_03



1 Käivitage oma nutiseadmes rakendus CareSens Air ja puudutage valikut **Loo konto**.

- Sisestage e-posti aadress, millega soovite registreeruda, ja puudutage valikut **Saada**. Teie poolt registreerumisel sisestatud e-posti aadressile saadetakse kinnituskood. Kinnitamise lõpuleviimiseks sisestage kuuekohaline kood.

Märkus

Kood tuleb sisestada 5 minuti jooksul pärast e-kirja saatmist. Puudutage valikut **Saada uuesti**, kui teil ei õnnestunud koodi ajapiirangu piires sisestada.

- Sisestage kasutajateave ja puudutage **OK**.

2. Sensori ühendamine

Sensori ühendamiseks nutiseadmega skanniga pakendi sildil olevat ribakoodi.

2 Käivitage oma nutiseadmes rakendus CareSens Air ja logige sisse. Puudutage järgnevas järjekorras valikut **Ohutusteave** > Lugege „Ohutusteave“ > Puudutage valikut **Sensori teabe skannimine**.

3 Skannige sensori pakendi sildil olevat ribakoodi või sisestage käsitsi seerianumbri 4 viimast numbrit ja 6-kohaline PIN-kood.

Märkus

- Aegunud sensoreid pole võimalik kasutada. Kontrollige enne kasutamist aegumiskuupäeva.
- Sisestage sensori pakendi sildil märgitud õige teave. Vale seerianumbri või PIN-koodi sisestamisel sensor ei ühendu.










4 Vaadake järele, kuidas sensorit kinnitada ja puudutage seejärel valikut **Käivita sidumine**.

3. Sensori kinnitamine

Kinnitage sensor oma õlavarrele ja vajutage toitenuppu. Oodake kuni sensori ühendamine on lõpule viidud.

- 5 Avage CareSens Air sensori pakend. Võtke pakendist aplikaator ja asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale.
- 6 Hoidke aplikaatorit ja eemaldage ohutuskork.
- 7 Eemaldage ohutuskork ja asetage aplikaator joonisel näidatud viisil õlavarre tagaküljele kuhu kinnitatakse sensor.
- 8 Vajutage aplikaatoril vabastusnuppu. Sensor kinnitatakse aplikaatorist õlavarre tagaküljele.
- 9 Eemaldage aplikaator ja veenduge, et sensor on korralikult kinnitatud.
- 10 Vajutage toitenuppu, kuni kostub klõpsatus. Nupp on nüüd sisse vajutatud. Oodake, kuni sensori ühendamine on lõpule viidud.

- CareSens Air pideva glükoosimonitooringu süsteemiga seotud tõsiste vahejuhtumite korral teavitage sellest tootjat ning teie riigi pädevat asutust.
- i-SENS, Inc. on selles juhendis sisalduva teabe hoolikalt ettevalmistanud, et see oleks võimalikult täpne. Sellele vaatamata ei vastuta i-SENS juhendis leiduda võivate vigade või väljajätmiste eest. i-SENS võib toote ohutuse, omaduste või tehnilise lahenduse täiustamise eesmärgil ilma sellest ette teatamata muuta juhendis kirjeldatud toodet või mis tahes seotud tarkvararakendusi.
- Käesolev dokument on kaitstud autoriõigusega. Selle juhendi kopeerimine või muutmine ilma ettevõtte i-SENS eelneva kirjaliku loata on rangelt keelatud.

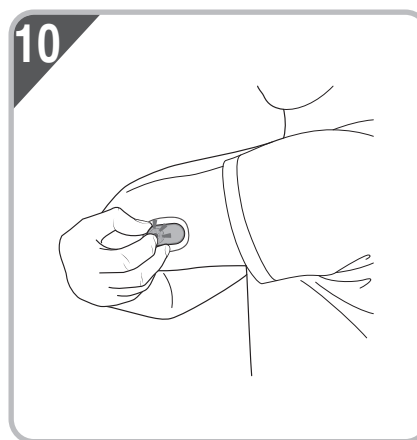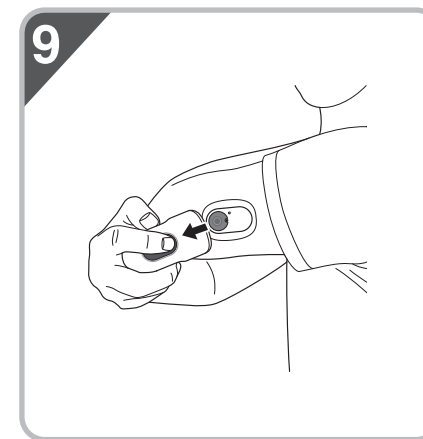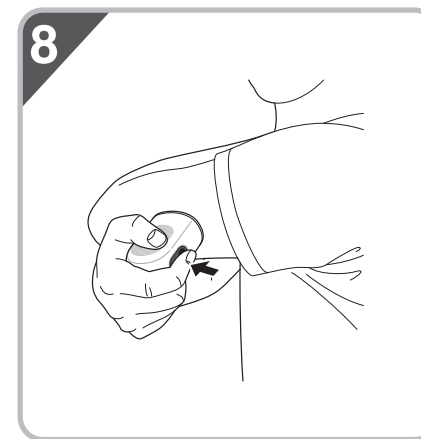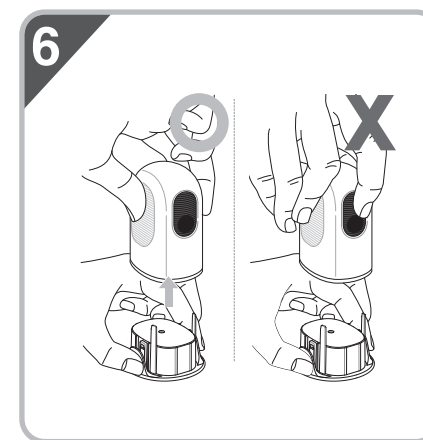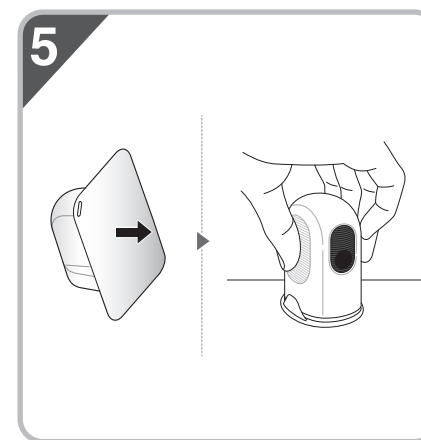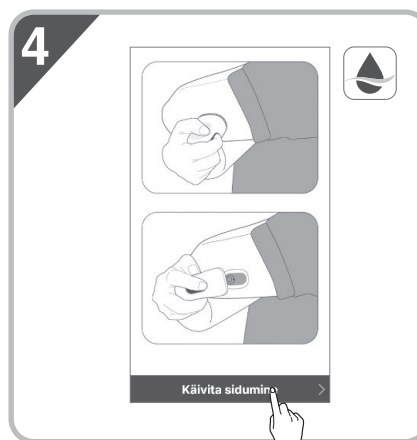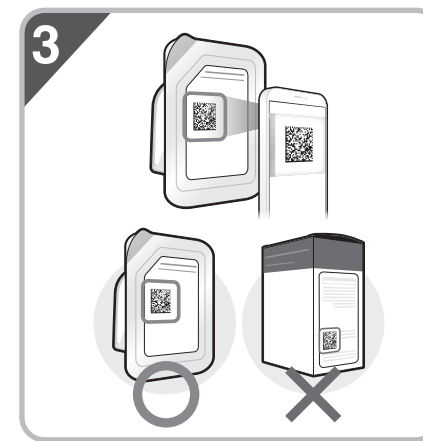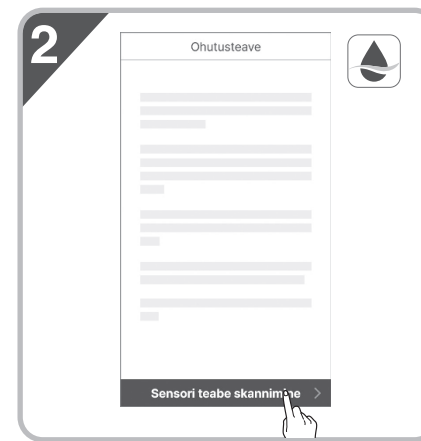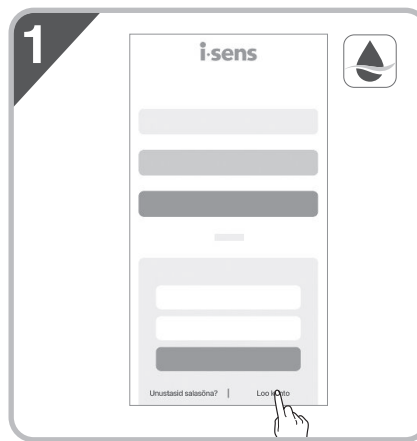

Kasutusjuhendi allalaadimine

Laadige alla rakenduse CareSens Air kasutusjuhend, tippides lingi oma brauserisse või skannides järgneva QR-koodi. Täiendava tõrgete kõrvaldamise teabe saamiseks võtke ühendust lähima ametliku edasimüüjaga.



<https://caresensair.com/download>