

Medtronic Extended Reservoir

Reservuaar



MMT-342, MMT-342T

Medtronic

Kasutusjuhised

See reservuaar on ette nähtud insuliini nahaaluseks manustamiseks koos ühilduvate Medtronicu insuliinipumpade ja Medtronicu Extended infusioonisüsteemidega. Ühilduvuse kohta vaadake oma insuliinipumba kasutusjuhendit.

Vastunäidustused

See reservuaar ei ole ette nähtud vere või vereprotspektide infusiooniks.

Hoiatused

- Ärge kasutage koos kahe- või kolmepäevaste infusioonisüsteemidega. Reservuaari võib kasutada kuni seitse päeva ainult koos Medtronic Extended infusioonisüsteemiga. Reservuaari kasutamine kahe- või kolmepäevaste infusioonisüsteemidega võib põhjustada hüperglükeemiat või diabeetilist ketoatsidoosi.
- Ärge kasutage reservuaari kauem kui seitse päeva. Selle ületamine võib põhjustada insuliini ebapiisavat manustamist, mis võib viia hüperglükeemiani.
- Reservuaar ja ülekandekaitse on steriilsed, pürogeenivabad ning mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.
- Ärge puhastage ega steriliseerige uuesti. Reservuaari taaskasutamine võib põhjustada insuliini lagunemist, nakkusi, ebatäpset ravimi manustamist või lekkeid, mis võivad kahjustada pumpa.
- Ärge kasutage reservuaari, kui pakend on avatud või kahjustatud.
- Visake ülekandekaitse ohutult teravate esemete konteinerisse.

- Reservuaari sees oleva õhu eemaldamata jätmine võib põhjustada ravimi ebatäpset manustamist.
- Kui insuliin või mõni muu vedelik satub voolikuühendusse, võib see ajutiselt blokeerida ventilatsiooniavad, mis võimaldavad pumbal infusioonisüsteemi õigesti täita. See võib põhjustada liiga väikese või liiga suure insuliinikoguse manustamist, mis võib viia hüperglükeemia või hüpoglükeemiani. Kui see juhtub, alustage uuesti uue reservuaari ja infusioonisüsteemiga.
- Selle reservuaariga tohib kasutada ainult kiiretoimelist U-100 insuliini, mille on määranud teile arst.

Ettevaatusabinõud

- Loe kõik juhised hoolikalt läbi enne Medtronic Extended Reservuaari kasutamist.
- Enne reservuaari täitmist peaks insuliin olema toatemperatuuril.
- Kui reservuaar on täidetud, kasuta seda viivitamatult. Ära säilita seda.
- Pärast reservuaari ja infusioonisüsteemi vahetamist, kontrolli võimalikke lekkeid.
- Tee oma esimene seadistus tervishoiutöötaja juuresolekul.

Garantii

Lisateavet leiame veebisaidilt:


www.medtronicdiabetes.com/warranty

2020 Medtronic. Kõik õigused kaitstud. Medtronic, Medtronic logo ja Further, Together on Medtronicu kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on Medtronicu ettevõtte kaubamärgid.

C €0459

Conformité Européenne (Euroopa Ühenduse vastavus). See sümbol tähendab, et seade vastab täielikult kohaldatavatele Euroopa Liidu õigusaktidele.

Vaata paigaldus- ja täitmishüsideid pumba ja infusioonikomplekti kasutusjuhenditest.

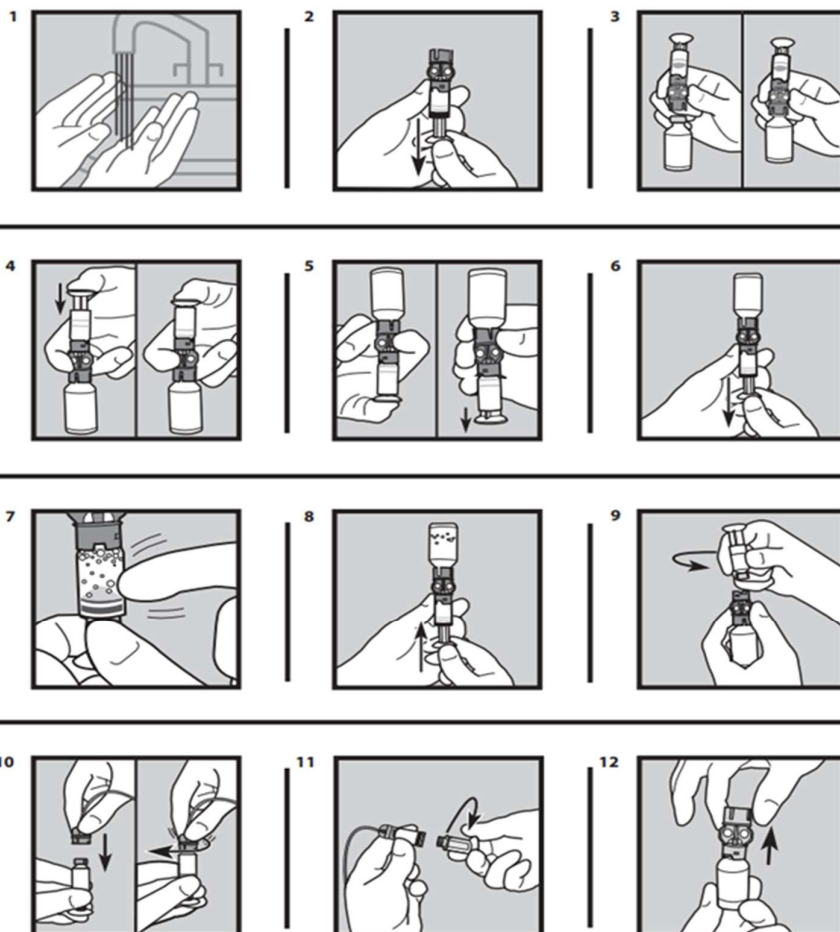

Taaskasutatav, sis. taaskasutatud materjali.



Üksiksteriilne kaitseüsteem.



Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud.



Tootmiskuupäev.




Ava siit



Steriliseeritud etüleenoksiidiga.



Mitte uuesti kasutada!

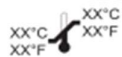

Säilitustemperatuuri piirangud.

Rx Only

Nõuab retsepti USA-s



Meditsiiniseade.



Tootja.



Kõlblik kuni kuupäev



Partiinumber



Artiklinumber



Apürogeenne



Säilituse niiskuse piirangud.



Volitatud esindaja EL-s



Mitte uuesti steriliseerida.



Tootmiskoht.



Vaata kasutusjuhendit.



Tähelepanu!



Kasutamise aeg (7 päeva).



Lateksivaba



Säilituse õhurõhu piirangud.

Medtronic



Medtronic MiniMed
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325 USA
1800 646 4633
+1818 576 5555
www.medtronicdiabetes.com



Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands

CE0459



(01)00763000419257(10)NA

09-2020

M002267C21A1_2



Esindaja Eestis:
AB Medical Group Eesti OÜ
Reti tee 12, 75312 Peetri, Rae vald
Tel.: +372 6552310

Juhendi tõlkinud: AB Medical Group Eesti OÜ