


Medtronic

Vajalik Medtronic rakenduse versiooni uuendus

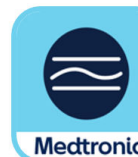

Lugupeetud Medtronicu kogukonna liige,

Meie andmed näitavad, et kasutate oma **Medtronic rakenduse** vanemat versiooni, st **MiniMed™ Mobile/Simplera™/CareLink™ Connect** rakendust. Peagi lõpetame nende vanemate versioonide toe **2025. aasta detsembri lõpus**.

Palun uuenda oma rakendus võimalikult kiiresti uusimale versioonile.

Miks see juhtub?

Parima kogemuse saamiseks soovitame alati kasutada meie rakenduste uusimaid versioone. Vanemad versioonid aeguvad kiiresti ja nende kasutamine võib viia kehvema kogemuseni või rakenduse ebakorraliku toimimiseni. Me ei saa garanteerida oma tuge vanematele versioonidele, seega on **oluline uuendada oma rakendus võimalikult kiiresti uusimale versioonile**.

Mida see sinu jaoks tähendab?

Alates 31. detsembrist 2025 ei toeta sinu praegune rakenduse versioon enam juurdepääsu CareLink™ Personalile – see tähendab, et oled CareLink™ Personalist

välja logitud ja sa ei saa uuesti sisse logida. See takistab hoolduspartneritel teie andmeid näha ja teavitusi saada. Samuti ei saa te jagada andmeid oma tervishoiuteenuse osutajaga ega luua CareLinki™ aruandeid.

Sellele probleemile on lihtne lahendus – **uuenda oma rakendus viimasele versioonile enne 31. detsembrit 2025** ja sul ei tohiks tekkida CareLinki™ isikliku ligipääsu probleeme.



iOS-seadmete jaoks:

1. Ava App Store'i rakendus.
2. Puuduta oma profiiliikooni ekraani ülaosas.
3. Keri, et näha ootel uuendusi. Kui sinu mobiilirakendus on nimekirjas, vajuta **ikooni kõrval Uuenda**, et rakendust uuendada. Kui see pole nimekirjas, siis on rakendus ajakohane.



Android-seadmete jaoks:

1. Ava Google Play rakendus.
2. Puuduta menüü ja seejärel Manage apps & devices.
3. Rakendused, millel on saadaval uuendus, on märgistatud **kui Uuendus saadaval**. Võid otsida ka konkreetset rakendust.
4. Kui sinu mobiilirakendus on nimekirjas, vajuta **Uuenda**.

Vajad abi?

Kui vajate täiendavat abi, helistage palun Medtronicu kohaliku maaletooja abiliini numbril [+372 655 2310](tel:+3726552310)

Alati su kõrval,
Teie Medtronic diabeedi meeskond

See on automaatne sõnum; Palun ärge vastake sellele sõnumile.

@2025 Medtronic. MiniMed ja MiniMed logo on Medtronic MiniMed, Inc. kaubamärgid ™ *
Kolmandate osapoolte kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on Medtronicu ettevõtte kaubamärgid.

Selle e-kirja saatis:

Medtronic Limited

Hoone 9, Croxley Park Watford, Hertfordshire WD18 8WW.

[Privaatsusavaldus](#)