

 **minimed** | **Medtronic**

CareLink™ Personal

Korraline hooldus

Plaanipärane tarkvaravärskendus



Lugupeetud MiniMedi kogukonna liige!

Tulekul on CareLink Personali plaaniline tarkvaravärskendus, mille ajal katkeb tarkvara võrguühendus:



**11. juuni 2026**  
**18:00–18:45 Kesk-Euroopa**  
**suveaja järgi**

## Mis muutub?

Teeme mõne värskenduse, et parandada teie CareLink Personali kasutajakogemust. Selle väljaandega märkate, et meie kodulehte värskendatakse, et see kajastaks meie uut MiniMedi identiteeti, samuti **uut viisi seadme andmete visualiseerimiseks** koos **CareLink™-i juhtpaneeli** kasutuselevõtuga, mis on juurdepääsetav kohe, kui logite sisse oma CareLink Personali kontole.



## Mis on uut?

- **Selgem ülevaade** seadme andmetest suvandiga „Aeg vahemikus“ ning esiletõstetud insuliini manustamise, sensori kulumise ja komplekti vahetamise teave (ainult pump).
- **Intuiitsemad visuaalid**, mis toetavad vestlusi teie hooldusmeeskonnaga. Vaadake üht päeva või viimase 7, 14 või 30 päeva keskmisi näitajaid koos võrdlustega.
- **Lihtsam viis** mustrite märkamiseks ja edusammude tähistamiseks.

Olenemata sellest, kas vaatate üle oma möödunud päeva, nädala või kuu või valmistute kohtumiseks, on uus juhtpaneel siin, et diabeediravi oleks lihtsam ja võimestavam.

## Mida võite selle plaanilise hoolduse ajal oodata?


Selle värskenduse toimumise ajal saate jätkata ettevõtte MiniMed seadmete ja seotud mobiilirakenduste kasutamist. Kui CareLink Personal on aga ühenduseta:

- ei ole [CareLink Personali](#) veebileht kättesaadav;
- ei saadeta andmeid ja teavitusi hoolduspartneritele;
- andmeid ei sünkroonita seotud tervishoiukliinikutega;
- mobiilirakendustes võidakse kuvada hüpikaknaid teadetega „Server Connection Error“ (Serveri ühenduse tõrge) ja „Upload Failed“ (Üleslaadimine ebaõnnestus);
- kui kasutate InPen™-i rakendust koos ettevõtte MiniMed™ lingitud sensoriga, siis ei näe te InPeni rakenduses oma sensori glükoositaset;

niipea, kui CareLink Personal on jälle võrguga ühendatud, taastuvad andmevoog ja teatiste edastamine automaatselt;

kui värskendus on lõpule jõudnud, kontrollige oma mobiilirakendus(t)e ühendust CareLink Personaliga. Kui ühendus puudub, peate oma mobiilirakendus(t)e kaudu uuesti CareLink Personali sisse logima.

## Juhised mobiilirakenduse kaudu CareLink Personali sisselogimiseks:

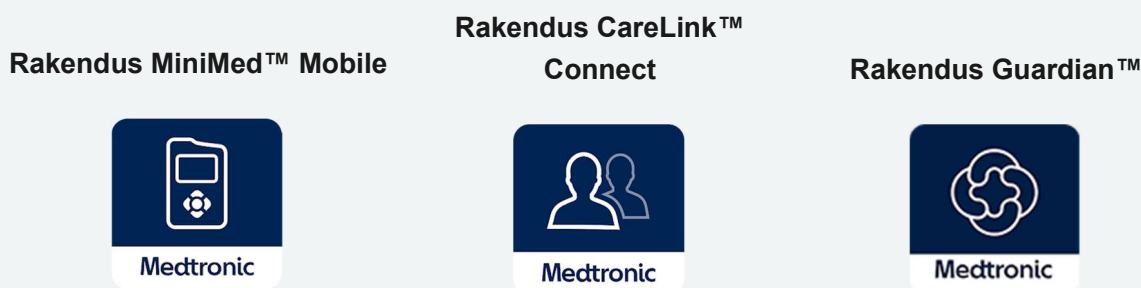

1. Puudutage avakuva vasakus ülanurgas menüükooni (kolm kriipsu).
2. Puudutage nuppu „Sync to CareLink“ (CareLinkiga sünkroonimine).
3. Puudutage nuppu „Change CareLink Sign-in“ (CareLinki sisselogimise muutmine), et uuestisisestage oma kasutajanimi ja parool sisestada.

## Abi CareLink Personali sisselogimiseks.

### Kas unustasite oma kasutajanime?

Valige CareLink Personali sisselogimiskuval selle taastamiseks „Forgotten your username“ (Unustasin oma kasutajanime) (peate võib-olla sisestama hiljuti üles laaditud seadme seerianumbri).

### Kas unustasite parooli? Pole probleemi!

- Valige „Forgotten your password“ (Unustasin oma parooli) ja sisestage oma kontoga seotud kasutajanimi ja e-posti aadress.
- Logid sisse veebibrauseris? Ühekordse koodi saatmine teie konto e-posti aadressile. Tehke valik „Sign in with one-time code“ (Logi sisse ühekordse koodiga) ja sisestage oma kasutajanimi.

Täname teid kannatlikkuse eest CareLink Personali kasutuskogemuse värskendamise ajal.

Alati teiega

**ettevõtte MiniMed tiim**



CE-SOF-2600017 © 2026. Medtronic MiniMed Inc. MiniMed ja MiniMedi logo on ettevõtte Medtronic MiniMed, Inc. kaubamärgid. Kolmandate poolte tootemärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid, kui meie materjalides leidub muid kaubamärgitooteid.

This email was sent to [abdullatif.shaar@medtronic.com](mailto:abdullatif.shaar@medtronic.com)  
[View in browser](#)

---

MiniMed  
Route du Molliau 31 Tolochenaz, VD 1131, Switzerland