

Tootekirjeldus ja sihtotstarve

Securin™ Skin Barrier on silikoonalusel nahasõbralik vedelik, mis moodustab nahal kaitsekihi ja tugevdab kleptoodete kleepuvust nahale, seda samal ajal kaitstes.

Securin Skin Barrieri sihtotstarve on moodustada nahal kleepuv kaitsekiht, mis hoiab nahka kleptoodete kasutamise ajal vigastuste eest.

Securin Skin Barrier on ette nähtud kasutamiseks vigastamata nahal.

Securin Skin Barrieri tohib kasutada kuni 7 päeva: seejärel peate eemaldama vana kaitsekihi ja paigaldama uue.

Securin Skin Barrier kantakse nahale enne kleптоote kasutamist.

Securin Skin Barrier sobib kasutamiseks nii väljaõppinud tervishoiutöötajatele kui ka tavainimestele.

Näidustused

- Securin Skin Barrier parandab kleptoodete kleepuvust nahal.
- Securin Skin Barrier kaitseb nahka kohas, kuhu paigaldatakse kleптоode.

Vastunäidustused

Securin Skin Barrier pole ette nähtud kasutamiseks imikutel.

Securin Skin Barrierit ei tohi kasutada isikutel, kes on toote koostisosade suhtes teadaolevalt allergilised.

Securin Skin Barrierit ei tohi kasutada lahtistel haavadel.

Hoiatused

Lõpetage Securin Skin Barrieri kasutamine, kui märkate kavandatavas kasutuskohas nahaärritust või nakkust.

Securin Skin Barrierit tohib lastel kasutada vaid meditsiinilise järelevalve all.

Ohtra higistamise korral võib Securin Skin Barrier kaotada kleepuvuse.

Securin Skin Barrier tuleb pärast kasutamist eemaldada siloksaanalusel kleepaine-eemaldi abil, nagu Furine ApS Medical Skin Wipe või Furine ApS Medical Adhesive Remover.

Ärge eemaldage Securin Skin Barrierit näiteks seebi, alkoholi ega muude mitte-siloksaanalusel ainete abil.

Securin Skin Barrier on ette nähtud kasutamiseks kaitsetoote ja kleepainena, mistõttu tuleb Securin Skin Barrierit kasutada kleптоote all. Kui Securin Skin Barrierit ei kaeta kleптоotega, võivad muud materjalid (nt nahk, riided või voodipesu) katmata Securin Skin Barrieri külge kleepuda.

Kui Securin Skin Barrieri kasutamisel esineb püsivat nahaärritust, pidage nõu tervishoiutöötajaga.

Furine ApS ei võta endale vastutust kahjustuste ega kahjude eest, mis võivad kaasneda Furine ApS-i hetkel kehtivate soovitude eiramisega.

Lisateave

Tootega seotud raske kehavigastuse (õnnetusjuhtumi) korral suhelge meie kohaliku turustaja või tootjaga ja kohaliku pädeva asutusega.

Kui vajate lisateavet või tehnilist abi, suhelge meiega veebilehel www.furine.com.

Sisaldab

Siloksaani

Kasutusjuhend

Toote paigaldamine:

1. Enne Securin Skin Barrieri paigaldamist peab nahk olema puhas ja kuiv ning õlidest ja kreemidest puhastatud. Kõige tõhusamalt saate naha ette valmistada, kasutades Furine ApS-i Medical Skin Wipe'i, mis eemaldab nahalt liigse õli ja rasu.



2. Kandke komplekti kuuluva pulgakese abil õhuke kiht Securin Skin Barrierit nahale kohas, kuhu paigaldatakse hiljem kleeptoode.

3. Securin Skin Barrier peab enne kleeptoote paigaldamist 60–90 sekundit kuivama.

Securin Skin Barrier peab olema enne kleeptoote paigaldamist täiesti kuiv. Kui Securin Skin Barrier on (osaliselt) märg, võib kleeptoote kleepuvus väheneda. Kuivanud Securin Skin Barrier tundub katsudes „naksuv“, kuid mitte märg.

4. Veenduge, et kleeptoode surutakse kindlalt kogu ette nähtud nahapinnale.

5. Pärast kleeptoote paigaldamist Securin Skin Barrierile eemaldage liigne Securin Skin Barrier kleeptoodet ümbritsevalt nahalt, kasutades Medical Skin Wipe'i.

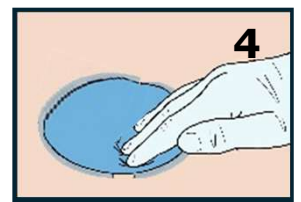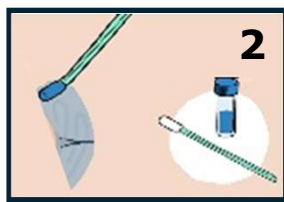

Toote eemaldamine:

Kui olete Securin Skin Barrieri kasutamise lõpetanud, eemaldage see nahalt siloksaanalusel salvräti või pihuse abil, nagu Medical Skin Wipe või Medical Adhesive Remover, mis lahustab Securin Skin Barrieri.

Eemaldage toode nahalt järgmiselt: tõmmake kleeptoodet ettevaatlikult servast ja pühkige õrnalt Medical Skin Wipe'iga või pihustage Medical Adhesive Removerit.

Eemaldage nahalt kindlasti kõik Securin Skin Barrieri jäägid.

Ärge kasutage kuivanud salvrätte.

Ärge kasutage mitte-siloksaanalusel salvrätte.



Ärge eemaldage Securin Skin Barrierit näiteks seebi, alkoholi ega muude mitte-siloksaanalusel ainete abil.

Körvaldamine:

Körvaldage Securin Skin Barrieri pakend ja tootejäägid koos tavalise olmeprügiga.



CE-märgisega seade



Ühekordselt kasutatav



Steriliseerimata



Lugege kasutusjuhendit

Version: IFUxB20-05EE
2024-03



Lateksivaba



Legal Manufacturer:
Furine ApS
Industrivaenget 1
3320 Skaevinge
Denmark



Säilitustingimused



Meditsiiniseade



Eriti tuleohtlik



Viitekode
B20EE10



Partiitähis
Märgitud põhipakendile



Kõlblik kuni
Märgitud põhipakendile