

EMST75 Lite rõhu kalibreerimistabel

Tabelis on esitatud tootja täpne kalibreerimisandmed EMST75 Lite seadme iga veerandpöörde kohta.

Nupu asend	Rõhk (cm H ₂ O)	Samm (cm H ₂ O)
0 (täielikult vasakul)	5	—
¼ pööret	7,5	+2,5
½ pööret	10	+2,5
¾ pööret	12,5	+2,5
1 pööre	15	+2,5
1¼ pööret	17,5	+2,5
1½ pööret	20	+2,5
1¾ pööret	22,5	+2,5
2 pööret	25	+2,5
2¼ pööret	27,5	+2,5
2½ pööret	30	+2,5
2¾ pööret	32,5	+2,5
3 pööret (üleminek)	35	+2,5
3¼ pööret	40	+5,0
3½ pööret	45	+5,0
3¾ pööret	50	+5,0
4 pööret	55	+5,0
4¼ pööret	60	+5,0
4½ pööret	65	+5,0
4¾ pööret	70	+5,0
5 pööret (maks)	75	+5,0



EMST150 rõhu kalibreerimistabel

Tabelis on esitatud tootja täpne kalibreerimine EMST150 seadme iga veerandpöörde kohta.

Nupu asend	Rõhk (cm H ₂ O)	Samm (cm H ₂ O)
Algas (täielikult vasakul)	30	—
¼ pööret	37,5	+7,5
½ pööret	45	+7,5
¾ pööret	52,5	+7,5
1 pööre	60	+7,5
1¼ pööret	63,75	+3,75
1½ pööret	67,5	+3,75
1¾ pööret	71,25	+3,75
2 pööret	75	+3,75
2¼ pööret	78,75	+3,75
2½ pööret	82,5	+3,75
2¾ pööret	86,25	+3,75
3 pööret	90	+3,75
3¼ pööret	93,75	+3,75
3½ pööret	97,5	+3,75
3¾ pööret	101,25	+3,75
4 pööret	105	+3,75
4¼ pööret	108,75	+3,75
4½ pööret	112,5	+3,75
4¾ pööret	116,25	+3,75
5 pööret	120	+3,75
5¼ pööret	127,5	+7,5
5½ pööret	135	+7,5
5¾ pööret	142,5	+7,5
6 pööret (maks)	150	+7,5

