


# ENLITE SERTERI KASUTUSJUHEND

## Enlite sensori süsteem

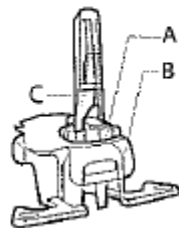

Serter


Sensor

Salvesti või saatja

1. Pese käed
2. Vali sensori sisestuskoht




3. Puhasta piirkond alkoholilahusega. Lase seejärel õhu käes kuivada

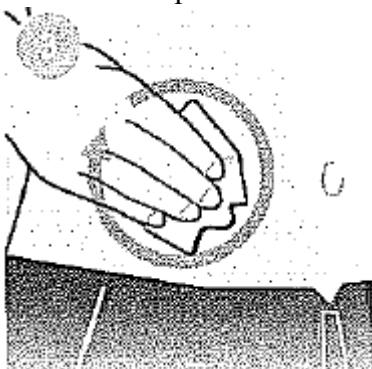




4. Ava sensori pakend



5. Eemalda pjedestaalil sensor pakendist. Aseta pjedestaaliga sensor tasasele pinnale.

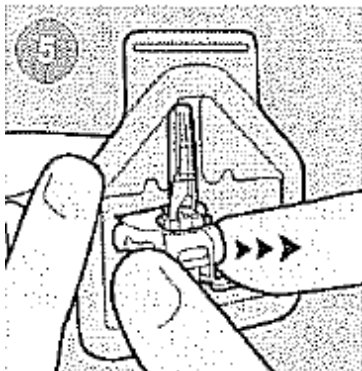


6. - 7. Suru Serter alla alusele, kuni serteri põhi asetseb tasasel alusel.

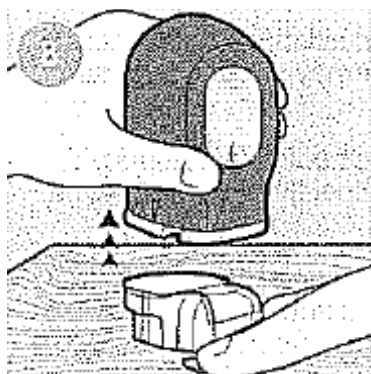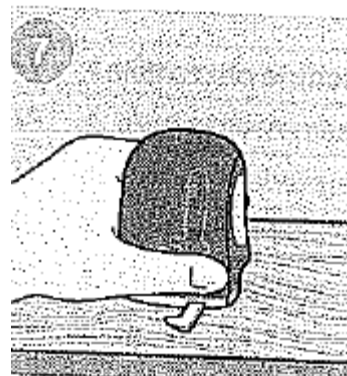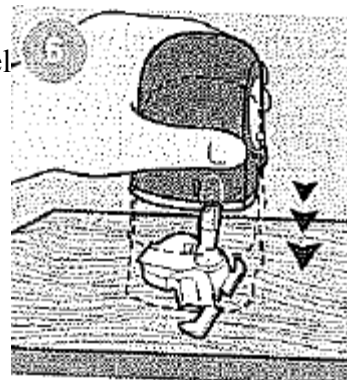

8. Serteri eemaldamiseks pjedestaalilt aseta kaks sõrme aluse haaradele ja tõmba Serterit aeglaselt otse üles. Ära eemalda pjedestaali Serterist õhus, sest see võib sensorit kahjustada.


**HOIATUS: Ära kunagi suuna vinnastatud Serterit kehaosa suunas, kuhu sisestust ei soovita.**

9. Aseta Serteri põhi tihedalt vastu keha, kohale kuhu soovid sensorit sisestada.

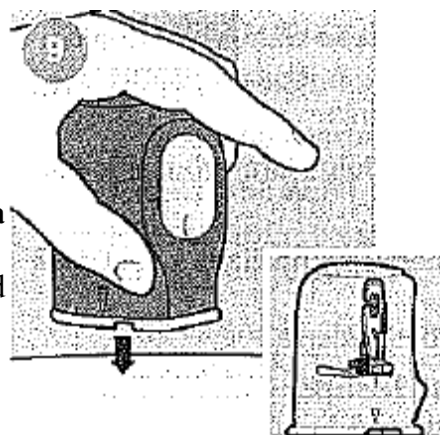

## HOIATUS: Nupu vabastamisel süstib Serter sensori.


NB: Serteri eemaldamiseks sensorist on vaja teist nupuvajutust.

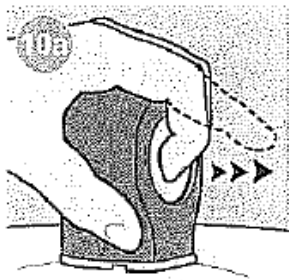


10a. Vajuta nupp sisse ja lase seejärel lahti.




10b. Oota 5 sekundit, et lasta plaastril nahale kleepuda.

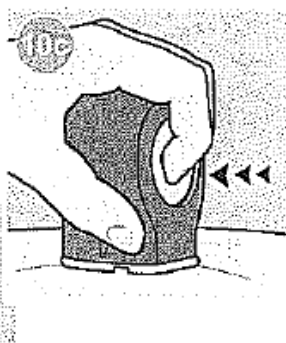

10c. Vajuta ja hoia nuppu sees.

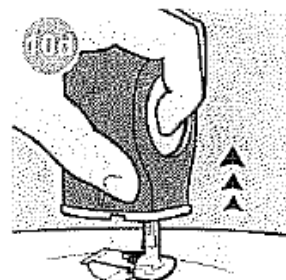


10d. Hoia serteri nuppu sees ja tõsta samal ajal Serter nahast eemale.

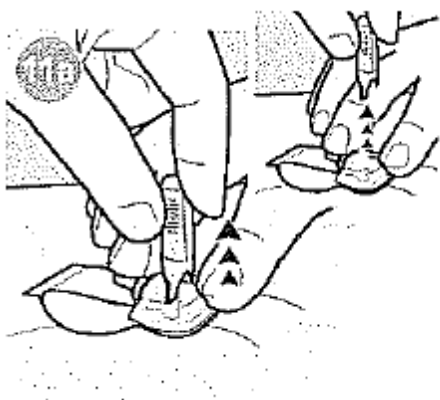

Patsient:

11a. Hoia sensori põhja vastu nahka. Võta nõelakesta ülaosast kinni ja tõmba seda aeglaselt otse üles sensorist eemale.

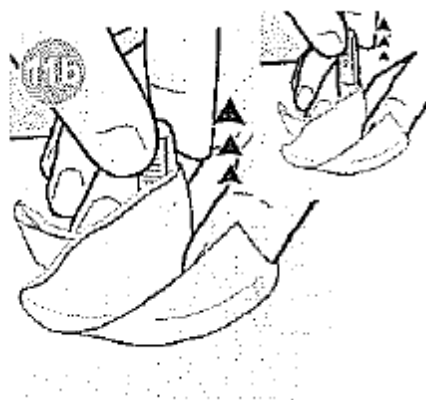


Meditsiinitöötaja või abi osutaja:


11b. Mähi steriilne marli ümber sensori (nagu näidatud pildil 11b). Hoia sensori põhja vastu nahka. Võta nõelakesta ülaosast kinni ja tõmba seda aeglaselt otse üles sensorist eemale.





12. Silu sensori plaaster sirgeks, et see oleks naha vastas.

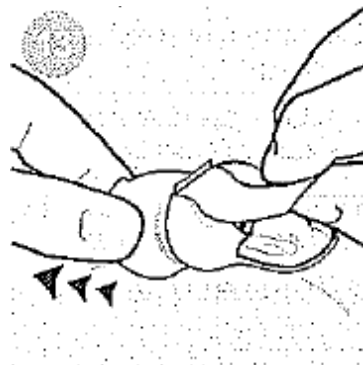


13. Hoia sensor paigal ja tõsta ettevaatlikult plaaster üles. Eemalda plaastri alt ettevaatlikult plaastri kaitse. Vajuta plaaster vastu nahka.

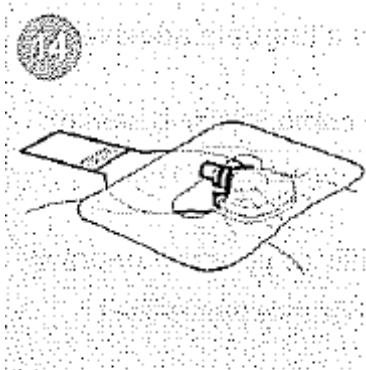




14. Enne MiniLik saatja ühendamist lisa sensorile veel üks plaaster. Ära kata sensori konnektorit (2) ega plaastri sakki (1) lisaplaastriga.

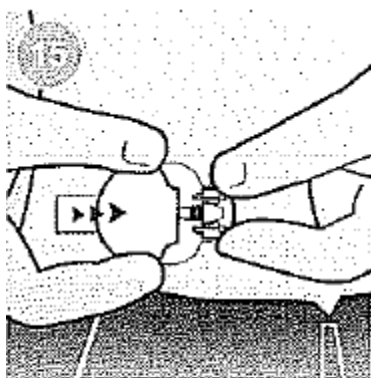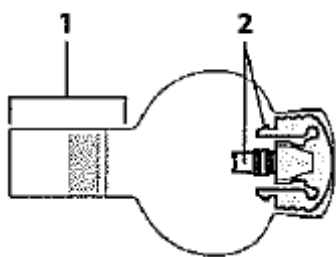

15-16. Ühenda MiniLink saatja sensoriga.  
NB: Ületeipimine ei ole näidatud piltidel 15-16.

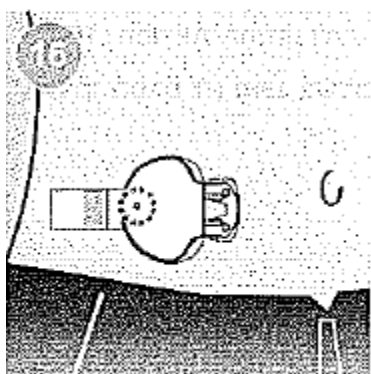

17-19. Kata MiniLink saatja läbipaistva plaastriga.

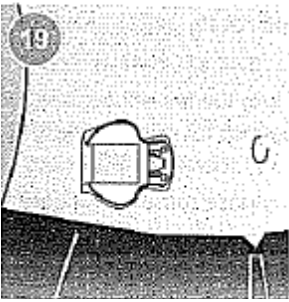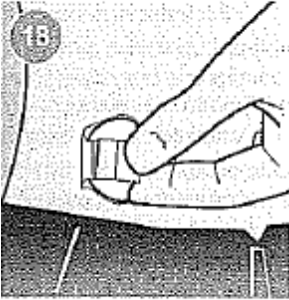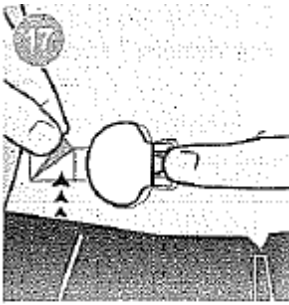

### Näidustused

Enlite sensori sisestamise seade (edaspidi Serter) on ette nähtud kui vahend, mille abil saab sisestada Enlite glükoosisensorit (sensorit).

### Vastunäidustus

Ära kasuta Enlite Serterit muul otstarbel kui ainult Enlite sensori sisestamiseks. Medtronic ei garanteeri selle toote ohutust või tõhusust kui kasutada teistel toodete puhul.

### Hoiatused

Loe kindlasti seda kasutusjuhust enne sensori paigaldama asumist. Kasutusjuhendi eiramine võib põhjustada valu või vigastuse. Enlite Serter ei tööta samuti nagu teised Medtronicu sisestusseaded.

**Serter süstib sensori kui vajutada nuppu ning seejärel see lahti lasta**, mitte hoides nuppu all.

Veritsus, paistetus, ärritus või põletik sisestuskohal on võimalikud sensoriga seotud riskid ja võivad olla põhjustatud valest sisestamisest ja sisestuskoha hooldusest. Sisestuskohta tuleb kontrollida sageli nende tunnuste suhtes ja tagamaks sensori püsimise õigel kohal. Kui on ilmnunud sellised sümptomid konsulteerige oma meditsiinitöötajaga.

Seadmel on automaatne nõela tagasitõmbamise mehhanism, mis võib põhjustada minimaalse veritsuse kui nõel eemaldub sensorist. Kui nõela eemaldub peale teie keegi teine siis tuleb seda teha käsivarre kauguselt ja suunatuna eemale endast ja teistest. Jälgida seadet pidevalt, et vältida juhuslikke torkevigastusi.

**Jälgi, et sisestuskohal ei tekiks veritsust. Kui veritsus ilmneb ära ühenda saatjat sensoriga. Avalda veritsuskohale ühtlast survet vähemalt 3 minutit, kasutades steriilset tampooni või**

## **puhast sidet.**

Sensor on steriilne ja mitte-pürogeenne, kui pakend on suletud ja vigastamata. Enne kasutamist tuleb alati pakendit kontrollida. Ära kasutage glükoosisensorit, kui selle steriilne pakend on eelnevalt avatud või vigastatud.

Kui veritsus peatub, ühenda saatja sensoriga. Kui veritsus EI peatu, ÄRA ühenda saatjat sensoriga.

1. Eemalda sensor ja viska minema.

2. Kontrolli, kas sisestuskohal esineb punetus, veritsus, ärritus, valu, tundlikkus või põletik ja hoolda vastavalt olukorrale.

3. Sisesta uus sensor teise kohta.

Kui sensor ei ole paigaldatud Serterisse korrektselt võib sisestamisel ilmnedada valu valu või vigastuse.

Seadeldis koosneb väikestest osadest ja võib ohustada väikelapsi.

## **Ettevaatusabinõud**

Alati pese käed seebi ja veega enne sensori paki avamist ja sensori käsitlemist. Meditsiinitöötajad peaksid järgima universaalseid ettevaatusabinõusid sensori ja Serteri käsitlemisel.

Ära sisesta sensorit läbi teibi ning kasuta ainult alkoholi lahuseid, et puhastada sensori sisestuskoht.

Ära kasuta teisi nahapreparaate enne sensori sisestamist.

Koosta endale rotatsiooniplaan sisestuskohtade valikuks.

Iga kasutamise järel viska sensor ja sisestusnõel torkavate/lõikavate jäätmete konteinerisse. Ära puhasta ja resteriiseeri ja ära püüa nõela nõelakaitsemest eemaldada.

## **Kuhu paigaldada sensor**

**ETTEVAATUST: Ole kindel, et sensori sisestuskoht on vähemalt 7,5 cm insuliinipumba infusioonikohast või süstekohast. Sensori asendamisel vali uus sisestuskoht vähemalt 5 cm kaugusele eelmisest kohast.**

Sisesta sensor kohta, kus on piisavalt naha-alust rasvkudet. Enlite sensor on ette nähtud kasutuseks kõhul ja tuharatel. (Vaata pilt 2)

Ära sisesta sensorit musklisse või kohta, mis puutuvad kokku riietega, aksessuaaridega, sportimisel aktiivselt liigutatavaid ja armkoega kaetud kohti kehal. Samuti väldi piirkonda ümber vöö või talje ja 5 cm ümber naba.

## **Säilitamine ja käsitlemine**

Hoiusta Serterit mitte vinnastatult, et säiliks Serteri eluiga.

## **Serteri hooldus**

Kasutades ühel patsiendil

1. Niisuta puhas lapp õrna vedelseebi lahusega. Pühi Serterit.
2. Loputa Serter sooja kraaniveega.
3. Pühi Serterit 70% isopropüülalkoholiga.
4. Aseta Serter puhtale, kuivale riidele ja lase kuivada õhu käes.


## **Mitmel patsiendil kasutamise korral**

**Hoiatus:** Kui verd on sattunud Serterile, tuleb see hävitada. Laadija hävitada vastavalt kohalikele seadusandlustele ohtlike jäätmete käitlemise kohta.

Järgi järgmisi protseduureegleid puhastamiseks Serterit pärast iga patsiendi kasutust:

1. Kasutades kindaid, niisuta puhas lapp sooja vee ja õrna vedelseebi lahusega. Pühi Serterit seebilahusega.
2. Loputa Serter sooja kraaniveega vähemalt 1 min. jooksul. Loputamise ajal aktiveeri Serter ja vajuta nuppu.

3. Valmista ensümaatiline puhastuslahus juhindudes tehasepoolsetest juhistest.
4. Leota Serterit lahuses, hoides Serterit üleni selles vähemalt 10 minutit.
5. Harja Serterit õrna harjasega harjaga, puhasta kõik raskesti ligipääsetavad kohad. Harjamise ajal aktiveeri serter. Võid kasutada Serteri puhastamiseks seestpoolt süstalt.
6. Loputa Serter voolava kraaniveega, et eemaldada puhastuslahuse jäägid. Aktiveeri loputamise ajal Serterit.
7. Kuivata Serter rätikuga.
8. Kontrolli, et ei jääks jääkaineid Serterile. Vajadusel korda protseduuri.
9. Pihusta kogu Serterile des.vahendit, nii et Serter jääks märgunuks vähemalt 5 minutiks
10. Loputa Serter voolava kraaniveega. Aktiveeri Serterit loputamise ajal.
11. Asetage Serter puhtale kuivale riidele ja lase õhukäes kuivada.
12. Kui on täiesti kuiv, asetage see suletud kotti, mis on sildistatud puhastamise kuupäevaga (vaadake näidet sildist).

	Järgi kasutusjuhendit
LOT	Partii kood
REF	Kataloogi number
	Tootja

Toodete maaletooja Eestis:



AB Medical Group Eesti OÜ  
 Reti tee 12, Peetri küla  
 75312 Rae vald, Harjumaa  
 Tel: +372 655 2310  
 Fax: +372 659 3250  
 E-mail: [info@abmedical.ee](mailto:info@abmedical.ee)  
[www.abmedical.ee](http://www.abmedical.ee)

