

## **Acapella® Vibreeriv PEP-ravi süsteem**

### **Näidustus:**

Vibreerivaid Acapella® PEP hingamisteraapia vahendeid kasutatakse kopsude tühjendusravis ja hingamise tõhustamiseks ning ravimite manustamisel. Tavalisemad näidustused on kroonilised obstruktiivsed kopsuhaigused (COPD), astma või tsüstiline fibroos.

### **KASUTUSJUHEND SEADMELE:**

#### **ACAPELLA® DM BLUE**

#### **ACAPELLA® DH GREEN**

Seade koosneb kahest osast:

- 1) huuliku osa, mis on eemaldatav;
- 2) keha osa, mille lõpus saab määrata väljahingatava õhu takistuse raskusastet (1-5).

Seadme kasutamiseks tuleb panna huuliku osa seadme kehaosale külge ja määrata enne kasutamist raskusaste (soovitav vahemik 2-4, alustada kergemast astmest).

Seadet peaks kasutama minimaalselt 3 korda päevas enne sööki või vähemalt 1 tundi hiljem peale sööki rahulikus olekus .

### **Kasutamine**

1. Pese käed vee ja seebiga;
  2. veendu, et seadmele on määratud õige raskusaste;
  3. hinga rahulikult nina kaudu sisse ja aseta huulik suhu;
  4. hoia hinge kinni 2-3 sekundit;
  5. hinga välja ühtlaselt 3-4 sekundi jooksul;
  6. peale väljahingamist hinga tavapäraselt sisse, ilma huulikult suust võtmata;
  7. korda harjutust 10 – 20 korda;
  8. peale harjutuste sooritamist hinga sügavalt sisse, kõhata tugevalt lahtise suuga 1-2 korda, et soodustada röga väljumist hingamisteedest;
- (Teine variant on forsseeritud väljahingamine ehk „haffing“. Hinga nina kaudu sisse, ava suu ja kõri ning pinguta kõhulihaseid ja suru järsult õhk kopsudest välja)
9. Kui röga ei ole väljunud, siis soorita harjutust (väljahingamist) 10-20 korda ning peale seda kõhida 1-2 korda.

### **PUHASTAMINE KODUSTES TINGIMUSTES:**

Puhasta alati enne käed. Seadet tuleks puhastada regulaarselt. Peale igat kasutamiskorda eemalda huulik kehast ja pese huulik jooksva vee all. Seadme keha osa on soovitav leotada vedela puhastusvahendiga (seebiveega). Selleks tuleks võtta 2 supilusikatäit vedelat pesuainet ja lahustada see 3 liitris soojas vees. Loputa hoolikalt jooksva vee all, ning aseta seade kuivama.

## PANE TÄHELE:

Acapellat (roheline / sinine) ei tohi pleegitada, keeta, autoklaavida, või paigutada nõudepesumasinasse ega mikrolaineahju. Need meetodid võivad halvendada nikeldatud mehhanismi, mis asub seadme sisemuses. Lisaks ei ole Acapella green/blue valmistatud kõrge temperatuuriga plastist.

### Acapella® Blue DM (sinine)









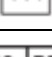

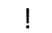


(voolu kiirus >15 liitrit minutis 3 sekundi jooksul)

### Acapella® Green DH (roheline)

(voolu kiirus <15 liitrit minutis 3 sekundi jooksul)

Kompaktse ehituse tõttu sobivad mõlemad mudelid eelkõige patsiendi isiklikuks kasutamiseks. Puhastada sooja seebiveega ja loputada steriilse (näit. keedetud) veega.

Tänu patenteeritud kiikemehhanismile töötab seade mistahes asendis - seistes, istudes või isegi pikali asendis, mistõttu lihtsustub eriti laste ja voodihaigete ravi. Seadme ülesehitus võimaldab ka läbi selle hingamist, mil sisse- ja väljahingamine on võimalik seadet suust võtmata. Hingamistakistit saab täpselt reguleerida seadme põhjal paiknevast regulaatorist. Seadme puhastamine on lihtne.

	Hoiatus!
	Lateksivaba
	Mitte kasutada kui pakend on vigastatud
	Mittesteriilne
	Partii number
	Kogus pakendis
	Kataloogi number
	Sisaldab või võib esineda ftalaate: bis (2-etüülheksüül) ftalaat (DEHP)
	Tootja
	Tootmis kuupäev
	EU volitatud esindaja
	US seaduste kohaselt võib seda toodet
	Kasutamiseks ainult ühe patsiendi poolt

Maaletooja :

AB Medical Group Eesti OÜ

Reti tee 12, Peetri alevik, 75312 Rae vald, Harjumaa

tel:6552310

e-mail: info@abmedical.ee

**Acapella® Blue DM**



**Acapella® Green DH**



**Acapella® Choice**



**Manufacturer:**  
**Smiths Medical ASD, Inc.**  
6000 Nathan Lane North  
Minneapolis, MN 55442 USA  
Tel: 1 800 258 5361 (USA/CA)  
Tel: +1 614 210 7300  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**EC REP** *European Representative:*  
**Smiths Medical International Ltd.**  
1500 Eureka Park, Lower Pemberton  
Ashford, Kent, TN25 4BF, UK  
Tel: +44 (0)1233 722100